



BEHANDELING KLIKGEBIT OP NIEUWE LOCATORS

EEN KUNSTGEBIT OP IMPLANTATEN

Een implantaat wordt vaak geplaatst als u bijvoorbeeld klachten houdt doordat uw kaak blijft slinken. Hierdoor wordt uw onderkaak minder hoog en gaat uw kunstgebit steeds losser zitten. Hierdoor gaat het kunstgebit schuiven en kan het extra klachten opleveren voor uw tandvlees.

Uw tandarts kan beoordelen of vervanging of aanpassing van uw huidige kunstgebit noodzakelijk en mogelijk is. Zo niet dan kan er gekozen worden voor het plaatsen van implantaten. Indien de tandarts zelf niet implanteert kan u worden doorverwezen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg. Voordat er een nieuw kunstgebit gemaakt wordt, dienen eerst de implantaten geplaatst te worden.

Bij bijna iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen, al gelden er voor een goed resultaat een aantal voorwaarden. Zo moet er bijvoorbeeld genoeg kaakbot aanwezig zijn en is het van belang dat uw kaakbot en tandvlees gezond zijn. Roken en overmatig alcoholgebruik kunnen het implanteren nadelig beïnvloeden.

BIJ PLAATSING VAN IMPLANTATEN KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN UITGEVOERD:

INTAKE

Om te beginnen vult u een gezondheidsvragenlijst in en neemt u deze door met uw tandarts-implantoloog of kaakchirurg. Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat we inzicht hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u op de vragenlijst aangeven. Na het invullen en bespreken van deze vragenlijst wordt uw mondholte gecontroleerd. Ook wordt er een röntgenfoto van uw kaken gemaakt. Aan de hand van het onderzoek en de foto's maakt de tandarts-implantoloog of kaakchirurg een behandelplan. Dit plan wordt met u besproken. Aarzel niet om extra toelichting of aanvullende informatie te vragen.

Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoedt, vult de tandarts-implantoloog of kaakchirurg samen met u de nodige (aanvraag)formulieren in. Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten.

IMPLANTOLOGIE

Tijdens de behandeling worden de implantaten geplaatst. Deze behandeling duurt ongeveer één uur. U krijgt een plaatselijke verdoving. Als de implantaten in uw onderkaak zijn geplaatst, wordt er een tijdelijke opbouw op het implantaat geplaatst. Deze opbouw zal door het tandvlees heen steken. Eventueel kan er voor gekozen worden om de opbouw in een vervolgspraak te laten plaatsen. Dan wordt eerst het tandvlees met hechtingen gesloten en wordt na een rustperiode, tijdens een tweede afspraak de opbouw geplaatst. Hierna volgt wederom een korte rustperiode.



Zeker. Geen gewoon gebit.



BEHANDELING KLIKGEBIT OP NIEUWE LOCATORS

RUSTPERIODE

Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden. Zo krijgt het bot de gelegenheid rond het implantaat vast te groeien. Eén tot twee weken na de eerste behandeling worden de hechtingen verwijderd en wordt de situatie in de mond gecontroleerd. Uw huidige kunstgebit wordt aangepast aan de nieuwe situatie en kan de gehele rustperiode gewoon worden gedragen.

VERVOLGBEHANDELING VOOR HET MAKEN VAN HET KLIKGEBIT

Uw tandvlees is nu mooi genezen en de definitieve opbouw kan geplaatst worden. Met een AvaDent prothese heeft u het voordeel dat de vorm en opstelling van uw vorige prothese overgenomen kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw huidige situatie niet helemaal, dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen van uw nieuwe klikgebit. Met uw wensen wordt rekening gehouden. Daarnaast kan het vervaardigen van de nieuwe steg en het klikgebit tegelijk worden uitgevoerd, in plaats dat men eerst de steg moet maken om vervolgens terug te komen om de prothese te maken. Dit bespaart u veel tijd.

VOOR EEN AVADENT PROTHESE KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN UITGEVOERD:

HET MAKEN VAN EEN INTRA ORALE SCAN EN BEETBEPALING

Uw huidige prothese zal worden gebruikt om opnieuw uw beet vast te leggen. Eerst wordt er een nieuwe afdruk met huidige prothese gemaakt en wordt uw kaak met ingescand met een intra orale scanner. Daarnaast worden uw wensen besproken door te kijken naar hoeveel tanden er zichtbaar moeten zijn tijdens het lachen en in rust. Ook wordt er vastgelegd op welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden uitgezocht en uw wensen van de opstelling van de tanden besproken. Indien u tevreden was met de opstelling en het uiterlijk van uw "oude" prothese dan kan deze worden overgenomen in de nieuwe AvaDent prothese. Tot slot worden al deze gegevens ingescand en krijgt u na afloop van uw behandeling de "oude" prothese weer mee naar huis. Met deze data en uw wensen wordt uw AvaDent prothese gemaakt.

De behandeling duurt ca. 50 min.

PASSEN EN OPPIKKEN IMPLANTATEN

Met behulp van de pasprothese worden uw wensen nogmaals besproken. Er wordt o.a. gekeken naar hoeveel tanden er zichtbaar moeten zijn tijdens het lachen en in rust. Ook wordt er bekeken op welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden bekeken en uw wensen van de opstelling besproken.

De behandeling duurt ca. 45 min.



Zeker. Geen gewoon gebit.



BEHANDELING KLIKGEBIT OP NIEUWE LOCATORS

PASSEN KLIKGEBIT

Het AvaDent klikgebit wordt geplaatst over uw nieuwe locators. Het kan in het begin even wennen zijn. Indien nodig kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. U ontvangt dan bij de vervolg afspraak de prothese om weer te passen. Als u tevreden bent kunt u ermee naar huis.

De behandeling duurt ca. 30 min. bij 1 of 2 implantaten, 40 min. bij 3 of 4 implantaten en 45 min. bij 5 implantaten of meer.

NACONTROLE

In de meeste gevallen went u snel aan de nieuwe prothese en kunt u zonder problemen de prothese blijven dragen. Mocht u toch last blijven houden van klachten, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om de problemen te laten verhelpen.

JAARLIJKSE CONTROLE

Laat jaarlijks uw kunstgebit en uw mond controleren. Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd uw kaak slinkt en dat er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden. Mocht u in de toekomst de prothese moeten laten vervangen, dan heeft u met de AvaDent prothese een digitale back-up. Hierdoor hoeft uw uiterlijk en de opstelling van het kunstgebit niet te veranderen wanneer er een nieuw kunstgebit gemaakt dient te worden.



Zeker. Geen gewoon gebit.