



BEHANDELING PARTIËLE PROTHESE

EEN PARTIËLE PROTHESE

Om allerlei redenen kunt u uw eigen tanden of kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Als een aantal tanden of kiezen ontbreekt, kan een gedeeltelijke (partiële) prothese worden toegepast. Deze zorgt ervoor dat u beter kunt bijten, kauwen en spreken. De partiële prothese kan ook het uiterlijk van uw gebit verbeteren. Bovendien wordt met een partiële prothese voorkomen dat uw andere natuurlijke tanden scheef gaan staan of verplaatsen. Indien u een tand bent verloren of dat de tandarts/kaakchirurg heeft samen met u besloten uw tand(en) en/of kiezen deels te trekken wordt er gestart met het aanmeten van uw partiële prothese.

HET MAKEN VAN UW PARTIËLE KUNSTGEBIT

Met een AvaDent prothese heeft u het voordeel dat de vorm en opstelling van uw vorige prothese overgenomen kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw huidige situatie niet helemaal, dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen van uw nieuwe kunstgebit. Met uw wensen wordt rekening gehouden.

VOOR EEN PARTIËLE PROTHESE KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN UITGEVOERD:

INTAKE GESPREK

Uw persoonlijke gegevens, medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. U ontvangt een offerte aangaande de kosten van de totale behandeling en indien nodig wordt ook de aanvraag voor de vergoeding van de zorgverzekering in orde gemaakt. De praktijk heeft over het algemeen met veel zorgverzekeraars een overeenkomst waardoor het aanvragen van deze behandelingen tot een minimum beperkt kan worden.

HET MAKEN VAN EEN INTRA ORALE SCAN EN BEETBEPALING

Afhankelijk van uw huidige situatie wordt het juiste behandelplan voor een scan bepaald. Er zijn hierbij twee situaties mogelijk:

Er worden tanden getrokken

Voordat de tandarts-implantoloog/kaakchirurg uw tand(en) trekt, wordt er een intra orale scan van uw gebit en een beetbepaling gemaakt. Deze scan dient als basis voor het vervaardigen van het partiële kunstgebit. Met een AvaDent partiële prothese heeft u het voordeel dat de vorm en opstelling van uw vorige prothese overgenomen kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw huidige situatie niet helemaal, dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen van uw nieuwe kunstgebit. Met uw wensen wordt rekening gehouden.

Er hoeven geen tanden te worden getrokken of tanden zijn al getrokken

Door middel van de intra orale scanner wordt uw gebit ingescand. Ook wordt er vastgelegd op welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden uitgezocht en uw wensen van de opstelling van de tanden besproken. Met deze data en uw wensen wordt uw AvaDent partiële prothese gemaakt.

De behandeling duurt ca. 40 min.





BEHANDELING PARTIËLE PROTHESE

EVENTUELE PASFASE

Met behulp van de pasprothese worden uw wensen nogmaals besproken. Er wordt o.a. gekeken naar hoeveel tanden er zichtbaar moeten zijn tijdens het lachen en in rust. Ook wordt er bekeken op welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden bekeken en uw wensen van de opstelling besproken.

De behandeling duurt ca. 40 min.

PASSEN PARTIËLE PROTHESE

Plaatsen partiële prothese bij het trekken van de tanden en kiezen

Het partiële kunstgebit wordt onmiddellijk, na het trekken van de (laatste) tanden, in de mond geplaatst. U vindt het wellicht een vreemd idee dat u een kunstgebit geplaatst krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit zich als een soort verband over de wonden plaatst. Als u het resultaat in de spiegel bekijkt zal het er waarschijnlijk wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken, er is immers heel wat in u mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit. U dient de partiële prothese minimaal 24 uur in te houden.

Passen partiële prothese wanneer er geen tanden of kiezen getrokken worden

De AvaDent prothese wordt geplaatst. Het kan in het begin even wennen zijn. Indien nodig kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. U ontvangt dan bij de vervolg afspraak de prothese om weer te passen. Als u tevreden bent kunt u ermee naar huis.

De behandeling duurt ca. 20 min.

NACONTROLE INDIEN TANDEN ZIJN GETROKKEN

In de meeste gevallen komt u na 24 uur terug bij uw tandarts/kaakchirurg om de prothese uit de mond te halen. De tandarts/kaakchirurg controleert of alles in de mond in orde is.

NACONTROLE INDIEN ER GEEN TANDEN ZIJN GETROKKEN

In de meeste gevallen went u snel aan de nieuwe partiële prothese en kunt u zonder problemen de prothese blijven dragen. Mocht u toch last blijven houden van klachten, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om de problemen te laten verhelpen.

JAARLIJKSE CONTROLE

Laat jaarlijks uw kunstgebit en uw mond controleren. Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd uw kaak slinkt en dat er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden. Mocht u nog meer tanden verliezen, dan heeft u het voordeel dat u met de AvaDent partiële prothese een digitale back-up heeft. Hierdoor is het uitbreiden van een partiële prothese binnen 1 jaar heel eenvoudig. Daarnaast is deze back-up ook handig als u bijvoorbeeld ooit naar een volledige prothese moet. Uw uiterlijk en de opstelling van uw gebit hoeft indien gewenst, hierdoor nauwelijks te veranderen.



Zeker. Geen gewoon gebit.